

Den lille flaskevandsguide.

1. Ved den daglige opstart, anbefaler vi følgende:

- Flaskens indhold fra dagen før, SKAL tømmes ud.
- Nyt flaskevand skal skyldes igennem alle unittens instrumenter, i ca. 1 min. (***Dette varierer dog alt efter flow/mængden af vand som bruges for hvert instrument. Det vigtige er her at alt vandet i slangerne "fra flasken til instrument" er nyt.***)

NB: Ved stuetemperatur og stillestående vand, formere bakterier sig hurtigt.

2. Ved forberedelse af flaskevand, anbefaler vi følgende procedure:

- 1 stk. "Aquatabs" pr. liter vand, lægges i et glas/kop med lidt demineraliseret vand, og lad det stå til tabletten er opløst "ca. 2-3 min"
- Fyld flasken med demineraliseret vand, eller til øverste fals på flasken.
- Hæld vandet fra glasset/koppen med det opløste tablet vand ned i flasken, og ryst flasken grundigt. (***sådan sikrer man sig at tabletternes virkning, kommer i kontakt med alt vandet i flasken***)
- Monter flasken, og denne er nu klar til brug.

NB: Aquatabs er desinficerende, og modvirker bakterie vækst.

NNB: Vi anbefaler demineraliseret, for at undgå mineraler i unitten, men postevand kan bruges i stedet. Dog vil der opstå opbygning af mineral belægninger i unittens komponenter over tid.

3. Hvis man under behandling skulle løbe tør for flaskevand, kan følgende gøres:

- Monter en ny flaske med behandlet vand.
- Eller man kan sætte systemet til by vand/postevand. (***Dette tilføjer dog mineraler og bakterier over tid til systemet, hvilket løbende kan forvolde mineral tilstopninger og opbygning af "Kim" bakterier.***)

NB: Man kan med fordel tilkøbe en ekstra flaske, som man kan have klar til disse situationer).

4. Månedlig rens:

- Fyld flasken med 1 liter demineraliseret, eller til nederste fals på flasken.
- Kom ca. 1/2 "Grundrengøringskoncentrat" ned i flasken, og ryst omhyggeligt.
- Monter flasken på unitten, og skyld alle instrumenter igennem, indtil flasken er næsten tom. (***Flasken må ikke blive tom, da man så fjerner væsken fra slangerne.***)

NB: Farven i væsken, indikerer når væsken er trængt igennem slangerne, og er væk fra slangerne igen.

- Lad væsken virke i ca. 12 timer, eller som minimum natten over.
- Afmonter flasken fra unitten, og monter en flaske, med behandlet vand, som vist i afsnit 4.
- Alle instrumenter skyldes igennem, indtil farven er helt væk.
- Herefter skyldes alle instrumenter yderligere igennem i ca. 6 min, som den normale morgenrutine forskriver.
- Unitten er nu klar til brug.

Varenumre:

Aquatabs:	AQ500
Grundrengøringskoncentrat:	dm805
Ekstra flaske 1L:	0010-364
Ekstra flaske 2L:	8164

