

BacTerminator® Dental kan også bruges som aftapningsstation for flaskesystemer

Aldrig mere Legionella, biofilm eller beskidt vand i din tandlægestol

Eksterne og interne tests med BacTerminator Dental

Praksis 1	
Drikkevand fra vandhane	Udgående vand fra tandlægestol med BacTerminator® Dental installeret
Legionella 500 cfu/ml	Legionella <1

Praksis 2	
Drikkevand fra vandhane	Udgående vand fra tandlægestol med BacTerminator® Dental installeret
Legionella 6.800 cfu/ml	Legionella <1

Intern test med BAC Terminator Dental	
Drikkevand fra vandhane	Udgående vand fra tandlægestol med BacTerminator® Dental installeret
Escherichia coli 50.000 cfu/ml	Escherichia coli <1
Bacillus subtilis (spore) 7.000 cfu/ml	Bacillus subtilis (spore) <1

Produceres i henhold til direktivet for medicinsk udstyr 93/42/EEC og EN ISO 13485. Produceret i henhold til normen for dental units – Vand og luftforsyning – EN ISO 7494-2 og EN 1717 Tilbagestrømssikring.

CE pat. No. 03788922.7
US pat. No. 10/529.042

BacTerminator® Dental
– et nyt patenteret produkt til tandlægestole



YDERLIGERE INFORMATION

Adept Water Technologies A/S
Ellekær 6
2730 Herlev
Danmark
Phone: +45 8870 8525
mail@adeptwatertech.com
www.adeptwatertech.com



We Disinfect Water – Better and Greener

Ingen håndtering af flasker, steriliseret vand eller kemikalier





Hvorfor vælge en **BacTerminator® Dental** ?

- Den dræber Legionella
- Den fjerner biofilm fra din tandlægestol
- Den producerer desinficeret vand
- Forebygger **kalkaflejringer** i tandlægestolen

– Alt dette **uden brug af kemikalier!** Derudover ...

- Den er nem at håndtere
- Nedsætter »Down-Time« på din tandlægestol
- Reducerer dine serviceomkostninger
- Forbedrer hygiejnen for både patient og bruger
- Enkel og hurtig installation

NEMT AT HÅNDTERE
OG VEDLIGEHOLDE




FRISK OG
DESINFICERET VAND




FÅ SUPER-DESINFICERET OG RENT VAND

Processen fra **dårligt til rent vand...**

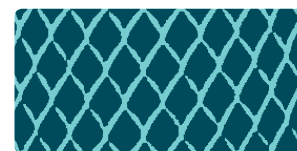


1. 100 Micron-filter fjerner partikler i vandet

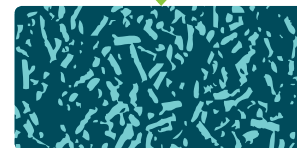

2. Aktivt kulfilter fjerner gamle klorrester, biologiske rester og farve



3. Ion-ombytter, fjerner kalk fra vandet

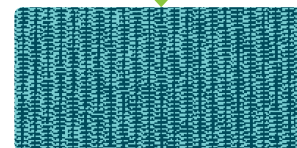

4. 1 Micron-filter fjerner smårester i vandet



5. Producerer ny klor, som dræber mikroorganismer og beskytter imod opbygning af biofilm i tandlægestolen



6. Bio Reaction Zone – sikrer at alle mikroorganismer dræbes af klor

