

Dudent® Danylen är ett säkert system för att undvika stickskador

Utvecklat enligt EU-direktiven om integrerad säkerhetsfunktion


INNAN INJEKTION

Sätt ihop Danylhylsans båda delar. Klick!



Obs! Danylhylsan är för engångsbruk, ska kastas efter användning.

Sätt i ampullen

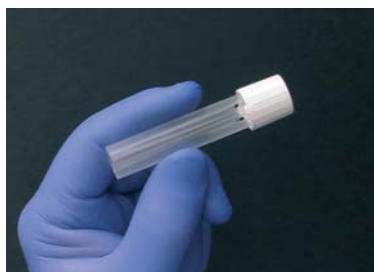

Trä på Danylhylsan på sprutan



Skruva på kanylen, klart att använda



EFTER INJEKTION

Skjut fram Danylhylsan över kanylen med tummen. Klick!



Obs! Enhandsfattning



Vrid Danylhylsans överdel åt höger. Klick!



Ta bort, eller töm
ampullen



Stoppa ner sprutan i kanyl borttagaren och avlägsna
kanylen med en knyck



Kasta!